



Nocolyse

Desinfektioaine



Nocospray suurtehosumuttimessa käytettävä desinfektioaine. Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfiointimenetelmä.

Käyttökohteet

Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfiointimenetelmä suljetuissa sisätiloissa, kuten huoneet, työtilat, ambulanssit jne.

Desinfiointimenetelmää suositellaan käytettäväksi siivouksen jälkeen. Erikoistilanteissa, esim. mikäli toimenpiteen tarkoituksena on henkilökunnan altistumisen ehkäisy, vetyperoksidisumutus voidaan tehdä siivousta edeltävänä toimenpiteenä.

Tuoteominaisuudet

Nocospray suurtehosumutin annostelee desinfektioainetta määritellyn huonetilavuuden mukaan 1 ml/m³.
Sumutusaika n. 36 s – 1 h (jonka aikana laite pitää kuuluvaa ääntä), kontaktiajan pituus tilan koosta riippuen 30 min – 1 h.

Käyttö- ja annostusohje

Irrota laitteesta pulloon kiinnitettävä yhdistäjä. Avaa Nocolyse-pullon turvatulppa, ohjaa yhdistäjän letku pulloon, kierrä pullo hyvin kiinni yhdistäjään ja aseta kokonaisuus tiiviisti takaisin paikalleen.

Nocospray vetyperoksidikuivahöyrytys:

Aseta laite mieluiten tilan nurkkaan siten, että kuivahöyry pääsee esteettömästi tilaan. Arvioi huoneen kuutiotilavuus ja valitse laitteesta oikea arvo (10 - 1000 m³), käynnistä laite. Laite annostelee desinfektioainetta määritellyn huonetilavuuden mukaan 1 ml / kuutiometri. Käytettävä annostus 1 - 7 ml/m³. Merkkiäänäen (10 s.) aikana poistu huoneesta ja sulje ovi. Höyrytysäänän sammuttua pidä huone edelleen suljettuna vähintään 30 minuuttia. Yli 500 m³ tiloissa kontaktiaika on 1 h. Yli 5 ml/m³ annostuksilla kontaktiaika 2 h. Tämän jälkeen huone on käytettävissä normaalisti.

Nocotest-kontrolliliuskat (tuotekoodi 8079): Ennen vetyperoksidikuivasumutusta kostuta liuskoja vedellä ja aseta niitä paikkoihin, joiden desinfiointi näyttää hankalimmalta. Liuskojen väri muuttuu, kun desinfiointiin tarvittava määrä kuivasumutettua vetyperoksidia osuu niihin. Pakkaus sisältää 100 kpl.

Huomioitavaa

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tutustu Nocospray-laitteen kirjallisiin käyttöohjeisiin.

Menetelmä ei edellytä ovien tiivistämistä tai ilmastonin sulkemista, mutta sumutus- ja kontaktiaikana käsiteltävässä tilassa ei voi oleskella tai käydä.

Mikäli käynti on välttämätön ja lyhytaikainen, on käytettävä tiiviitä suojalaseja ja kertakäyttöistä hengityssuojainta. Pitkäaikaisemmassa käytössä kesken sumutuksen on käytettävä hengityksensuojainta NO-P3 kaasusuodattimella. Lue suojautumisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Vetyperoksidia	6 %	mikrobisidinen tehoaine
hopea	17 ppm	katalysaattori

Tuotteen pH

4.5 hapan

Varastointi

Lämmin varasto, 5-25°C. Avaamaton pakkaus säilyy 2 v. valmistusajankohdasta. Käytä avattu pakkaus 2 kk aikana.

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön neste.

Valmistusmaa

RANSKA

Pakkaukoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	8521	
	8522	
	8525	
6 x 1 l	8078	

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.