



Kiilto Pro Cleanisept Wipes

Alkoholiton desinfektiopyyhe nopeaan desinfiointiin



CE
0123



Desinfektiopyyhepakkaus ei-invasiivisten lääkinällisten laitteiden ja välineiden pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin. Sisältää 100 kpl rullasta repäistävää pyyhettä. Saatavilla täyttöpakkaus (8085).

Käyttökohteet

Lääkinällisten laitteiden pintojen puhdistus ja desinfiointi. Pyyhkeet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi ultraäänilaitteiden antureiden desinfektioon (mm. Siemens, Philips, GE, Shimadzu, SonoAce, Aloka, Toshiba, Esaote, Zonare, Hitachi, Weinmann, Compumedics).
Elintarviketeollisuudessa ja ammattikeittiössä tuotetta käytetään omavalvonnassa käytettävien tutkimusvälineiden (mm. lämpömittarit) desinfiointiin.

Ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Pyyhkeet ovat nukkaamatonta kuitukangasta. Mikrobisidisestä tehosta on saatavilla laajat tutkimustulokset (Bakteerit, sienet, homeet EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 1650, EN 1276, EN 1275, EN 1040, virukset: EN 14476 (Vaccinia, Polyoma), EN 16615 pyyhetesti).
Desinfektioaineseos on pH:ltaan neutraali ja soveltuu myös herkille materiaaleille, esim. erilaiset muovit. Tuote on dermatologisesti testattu. Pakkaus sisältää 100 kpl rullasta repäistävää kertakäyttöistä kuitukangaspyyhettä, pyyhkeen koko 14 x 20 cm. Saatavana myös täyttöpakkaus (tuotekoodi 8085).

Käyttö- ja annostusohje

Muovipakkaus sisältää suljetussa pussissa olevan pyyherullan. Kierrä kansi auki, leikkaa halkio pussin yläsaumaan ja pujota pyyherullan pää kannen käyttöaukon läpi. Käyttö: Pyyhi pinnat huolellisesti Cleanisept Wipes - pyyhkeellä, niin että ne kostuvat kaikilta osin ja anna kuivua, huomioi kontaktaiaika. Lääkinälliset laitteet, jotka käyttötarkoituksen puolesta joutuvat kosketukseen ihon kanssa, tulee huuhdella 15 sek. juoksevan veden alla altistumisen jälkeen. EU:n lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen mukaan käyttäjät/potilaat ovat velvoitettuja ilmoittamaan kaikista vakavista laitteeseen liittyvistä vaaratilanteista sen EU-jäsenvaltion valmistajalle ja viranomaiselle, jossa käyttäjä/potilas sijaitsee. Avattu pakkaus säilyy 3 kk.

Huomioitavaa

Sulje kansi aina käytön jälkeen. Avattu pakkaus käytettävä 3 kk kuluessa.

Koostumus	Tehoaine	Vaikutus	
	Didecylmethylammoniumchlorid	desinfioiva tehoaine	
	Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid	desinfioiva tehoaine	
	Alkylethylbenzyldiemthylammoniumchlorid	desinfioiva tehoaine	
Tuotteen pH	7.5 neutraali		
Ulkonäkö ja tuoksu	Vaalea pyyhe, mieto tuoksu		
Valmistusmaa	SAKSA		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeisiin liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	12 x 1 kpl	8080	4260068629711
	12 x 1 kpl	8085	4260068629704
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		