

Oxivir Excel Wipes Acti

Puhdistus- ja desinfiointipyyhkeet puhdistus- ja desinfiointiaine ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille ja koville pinnoille

Kuvaus tuotteesta

AHP-tekniikalla toimiva puhdistus- ja desinfiointipyyhe, joka puhdistaa ja desinfioi yhdellä käsittelyllä. Soveltuu ammattikäyttöön kaikille koville pinnoille ja ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille. (vain ammattikäyttöön.)

Ominaisuudet

- Käyttövalmis pyyhe, Ihanteellinen tuote kaikkiin käyttökohteisiin, mukaan lukien terveydenhuolto ja elintarviketilat
- Täysi virusidinen teho
- Nopea teho laaja-alaisesti viruksiin, bakteereihin ja hiivoihin
- Erinomainen puhdistuskyky
- Hajusteeton
- Ei tarvitse huuhtelua
- Vaikuttava aine hajoaa vedeksi ja hapeksi
- BPR-hyväksytty biosidi
- Sertifioitu lääkinnällinen laite

CE
0044



 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



BPR
APPROVED



© A.I.S.E

Oxivir Excel Wipes Acti

Edut

- Oxivir Excel Wipes Acti tarjoaa laajasti tehoa bakteereita, hiivoja ja viruksia vastaan lyhyellä vaikutusajalla. Puhtautta ja hygieniää huolestuttavia patogeenejä vastaan
- BPR-hyväksytty ja kattavasti testattu eurooppalaisten standardien mukaisesti
- Oxivir Excel Wipes Acti on täysin viruksia tappava. Sen teho on todistettu sekä vaipattomia että vaipallisia viruksia vastaan. (esim. polion, adenoviruksen, hiiren noroviruksen sekä koronaviruksen, vacciniaviruksen, HIV:n, HBV:n, HCV:n ja influenssa)
- Oxivir Excel Wipes Acti puhdistaa erinomaisesti tehokkaiden pinta-aktiivisten aineiden ansiosta, mikä tekee siitä paitsi erinomaisen käyttövalmiin desinfiointipyyhkeen myös erinomaisen puhdistuspyyhkeen
- AHP-koostumus on hellävarainen pinnoille. Eikä jätä jäämiä pintaan.
- Oxivir Excel Wipes Acti sopii päivittäiseen käyttöön kovien pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin sekä käytettäväksi julkisten tilojen kosketuspinoilla. (vähittäiskaupassa, kouluissa, ruokapalveluissa, pitkäaikaishoidossa ja muilla aloilla sekä sairaaloiden korkean riskin alueilla, kuten leikkaussaleissa, teho-osastoilla, vastasyntyneiden teho-osastoilla ja potilashuoneissa)
- Ei vaadi henkilönsuojaimia, ellei sitä käytetä pidempään

Käyttöohje

Käyttövalmis pyyhe, tehokas ja vaivoton puhdistus ja desinfiointi pinnoille. Käytä huoneenlämmössä:

- Poista karkea lika.
- Avaa kansi, ota yksi pyyhe ja sulje kansi.
- Levitä tuotetta kostuttamalla täysin pinta ja/tai ei-invasiivinen lääkinnällinen laite.
- Anna vaikuttaa 5 minuuttia.
- Anna kuivua ilmassa. Pintaa ei tarvitse huuhdella.
- Pese kädet käsittelyn jälkeen.

Käyttö: n. 1,6 m² yhdellä pyyhkeellä.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Valkoinen pyyhe
Tuoksu:	Neutraali
pH-arvo (laimentamaton):	≈ 1.95
Suhteellinen tiheys (20°C):	≈ 1
Säilyvyys:	2 vuotta valmistuksen jälkeen (viimeinen käyttöpäivä: katso pakkaus). 28 päivää avaamisen jälkeen
Vaikuttava ainesosa:	0,36% vetyperoksidia

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Oxivir Excel Wipes Acti

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Täydelliset ohjeet tuotteen käsittelystä ja hävittämisestä löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta: sds.solenis.com. Noudata hyvää teollisuushygieniaa ja turvallisuuskäytäntöjä. Pidä tuote erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehuista. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa, ellei Diversey toisin suosittele. Säilytä alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa +5 °C – +30 °C lämpötilassa. Vältä pakkasta ja suoraa auringonvaloa. Tuotetta ei ole tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi. Vain ammattilaiskäyttöön / erikoiskäyttöön.

Varoitus

Säilytys: 6–35 °C. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Suojaa auringonvalolta. Käsittele noudattaen hyviä teollisuuden hygieni- ja turvallisuuskäytäntöjä. Pidä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehusta. Tuotetta ei ole tarkoitettu uudelleenkäyttöön. Pidä poissa lasten ja ei-kohde-eläinten ulottamattomissa. Varoitus: Voi syövyttää metalleja.

Henkilösuojaimet

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen henkilösuojaimista on annettu erillisessä turvallisuustiedotteessa; sds.diversey.com.
Henkilösuojaimet: Käytä tarvittavia henkilösuojaimia. **Käsien suojaus:** Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Pitkäaikaisessa kosketuksessa voi olla tarpeen suojata iho.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen hävittämisestä löytyvät erillisestä turvallisuustiedotteesta; sds.diversey.com.

Yhteensopivuus

Oxivir Excel Wipes Acti on tarkoitettu käytettäväksi kovien pintojen desinfiointiaineena, mukaan lukien ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden kovat pinnat. Suositelluissa käyttöolosuhteissa Oxivir Excel Wipes Acti soveltuu käytettäväksi esimerkiksi ruostumattomalle teräkselle, kromille, vinyylille, nailonkankaille, laminoiduille pinnoille, lasille, kumille, koviille ja joustaville muoveille (polypropeeni, polyuretaani, polyeteeni, PVC-akryyli, lasikuitu ja polykarbonaatti). Muita kuin mainittuja käyttötarkoituksia ei suositella. Oxivir Excel Wipes Acti ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa. **Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Ei sovellu huokoisille tai hapolle herkille pinnoille.**

Mikrobiologiset tiedot

Käyttöalue : PT2 Terveystuote likaisissa olosuhteissa, PT2 Muu kuin terveystuote likaisissa olosuhteissa & PT4 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat likaisissa olosuhteissa

Käyttöalue	Mikrobi	Testi	Organismi	Laimennus	Kontaktiaika
Kaato	Bakteerit	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. Hirae, P. Auruginosa, S. aureus, E. Coli.	RTU	5 min
	Hiivat	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virukset	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Oxivir Excel Wipes Acti

Ympäristötiedot

Tässä tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia EU:n pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 vaatimusten mukaisesti.

Hyväksynät

- Biosidi: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Lääkinnällisten laitteiden ilmoitettu laitos: CE0044

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.27/03/2026 fi-FI (K02979)